



# SAmAs

Software für **Arbeitsmedizin** und **Arbeitssicherheit**

**Arbeitsmedizin**



**Arbeitssicherheit**



**sSafety Web**



**SAmAs – Anbindung des Rodenstock Perismart oder Peristat (V6-17)**

© 1993-2017 • SAmAs GmbH • Technologiepark 9 • 33100 Paderborn • Tel: 05251 20565-0

Autoren: Vanessa Quandt

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Autoren reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

**Wichtiger Hinweis:** Die in diesem Handbuch verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen unterliegen dem allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder patentrechtlichem Schutz.

Änderungen vorbehalten.

## Inhalt

|  |          |
|--|----------|
| <b>Inhalt .....</b>  | <b>3</b> |
| <b>Informationen.....</b>  | <b>4</b> |
| Voraussetzungen.....   | 4        |
| Allgemeiner Ablauf .....   | 4        |
| <b>Einrichtung der Rodenstock Perismart/Peristat Software für den GDT-Export .....</b> | <b>5</b> |
| <b>Anbindung der Rodenstock Perismart/Peristat Software an SAMAs.....</b>              | <b>6</b> |
| <b>Abbildungsverzeichnis.....</b>  | <b>8</b> |

## Informationen

### Voraussetzungen

1. Die Gerätesoftware muss auf den entsprechenden PCs installiert sein.
2. Die Installation der Gerätesoftware erfolgt immer durch den Kunden oder dessen IT-Dienstleister.

### Allgemeiner Ablauf

1. Gerätesoftware auf dem PC installieren.
2. In der Gerätesoftware prüfen, welche Pfade für die Eingangs- und Ausgangsdatei hinterlegt wurden. (Seite 5)
3. Nun muss noch die Kommunikation/Anbindung mit SAmAs erfolgen. Dazu wechseln Sie zu den Beschreibungen aus „Anbindung der Rodenstock Perismart/Peristat Software an SAmAs“. (Seite 6)

#### **Anmerkung:**



- Es kann vorkommen, dass in der Gerätesoftware die Schnittstelle für den GDT-Transfer erst aktiviert werden muss.
- Bitte achten Sie darauf ab WIN Vista die Eingangs- und Ausgangsdatei nicht unter C:\Programme abzuspeichern. Als Alternative können Sie diese unter C:\GDT abspeichern.
- Die Pfade für Ein- und Ausgangsdatei müssen in der Gerätesoftware und in SAmAs übereinstimmen. Sonst ist eine korrekte Korrespondenz zwischen den Systemen nicht möglich.

## Einrichtung der Rodenstock Perismart/Peristat Software für den GDT-Export

1. Starten Sie die Rodenstock Perismart/Peristat Software.
2. Klicken Sie jetzt auf den Button **Werkzeuge** und dann auf **Service Menü**.
3. Anschließend finden Sie den Karteireiter **Einstellungen**.
4. Unten links finden Sie eine Checkbox **GDT**. Aktivieren Sie diese.
5. Die Pfade für GDT und PDF sind vorgegeben.

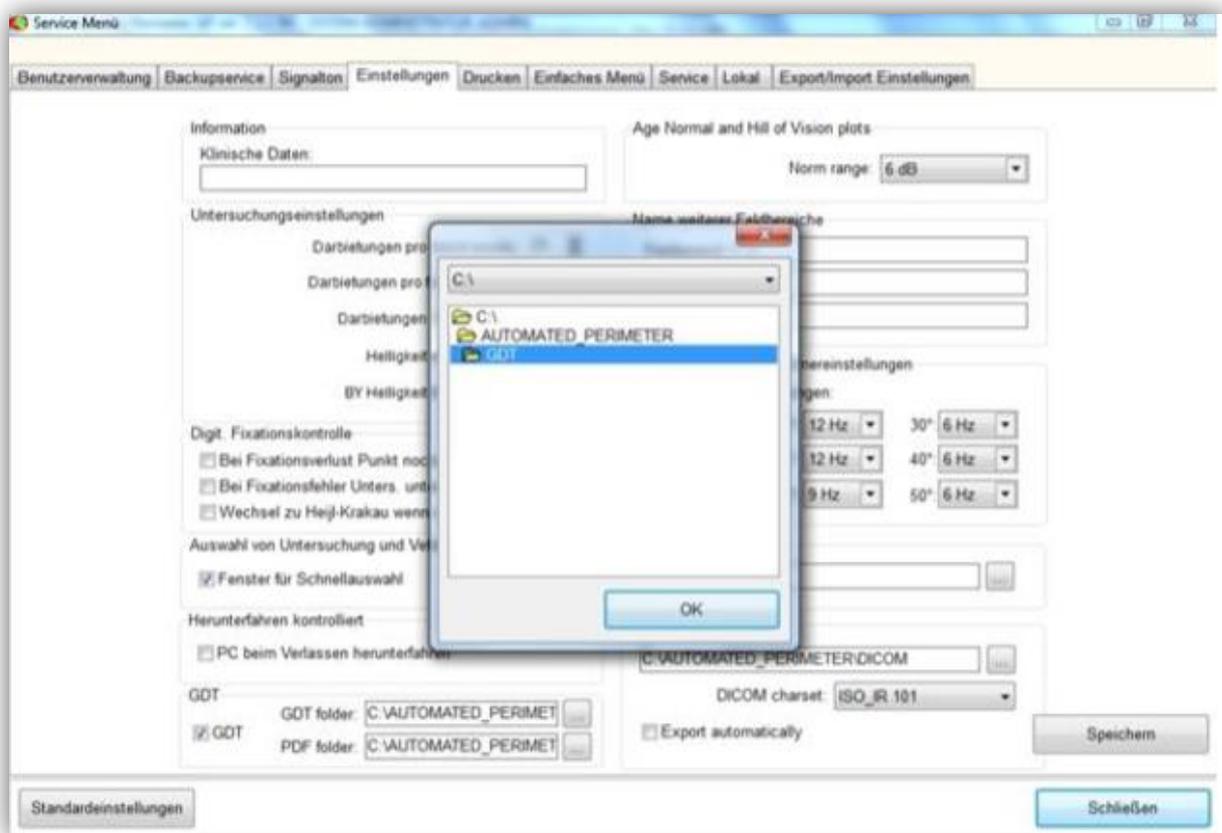


Abbildung 1: Konfiguration Rodenstock Perismart/Peristat

6. Als nächstes gehen Sie bitte zur Konfiguration in SAMAs über.

## Anbindung der Rodenstock Perismart/Peristat Software an SAMAs

- Bitte gehen Sie in SAMAs unter Daten → System → Geräteeinstellungen. Das Geräte-Schnittstellen Fenster öffnet sich.
- Klicken Sie auf Perimetrie. Geben Sie die Gerätebezeichnung anhand folgender Abbildung an.

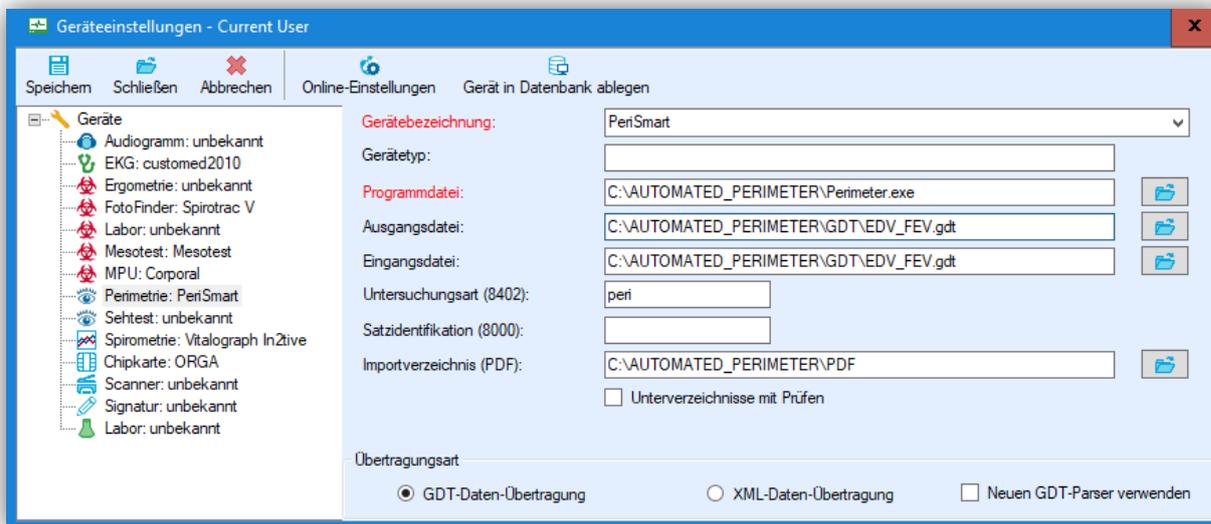


Abbildung 2: SAMAs Geräteeinstellungen

Einstellung zur Programmdatei: C:\AUTOMATED\_PERIMETER\Perimeter.exe

Einstellung zur Ausgangsdatei: C:\AUTOMATED\_PERIMETER\GDT\EDV\_FEV.gdt



**Anmerkung:** Eine GDT-Datei wird von der Gerätesoftware nicht zurückgegeben. Da dieser Pfad dennoch befüllt sein muss, tragen Sie bitte wieder die Daten der Ausgangsdatei ein.

Einstellung zur Eingangsdatei: C:\AUTOMATED\_PERIMETER\GDT\EDV\_FEV.gdt

Untersuchungsart: peri

Einstellungen zum Importverzeichnis (PDF): C:\AUTOMATED\_PERIMETER\PDF

- Nach erfolgter Eingabe betätigen Sie die Schaltfläche **Speichern**.

- Erstellen Sie nun aus dem Befundbaum eines ausgewählten Probanden eine neue Perimetrie-Untersuchung. Es öffnet sich die unten abgebildete Maske.

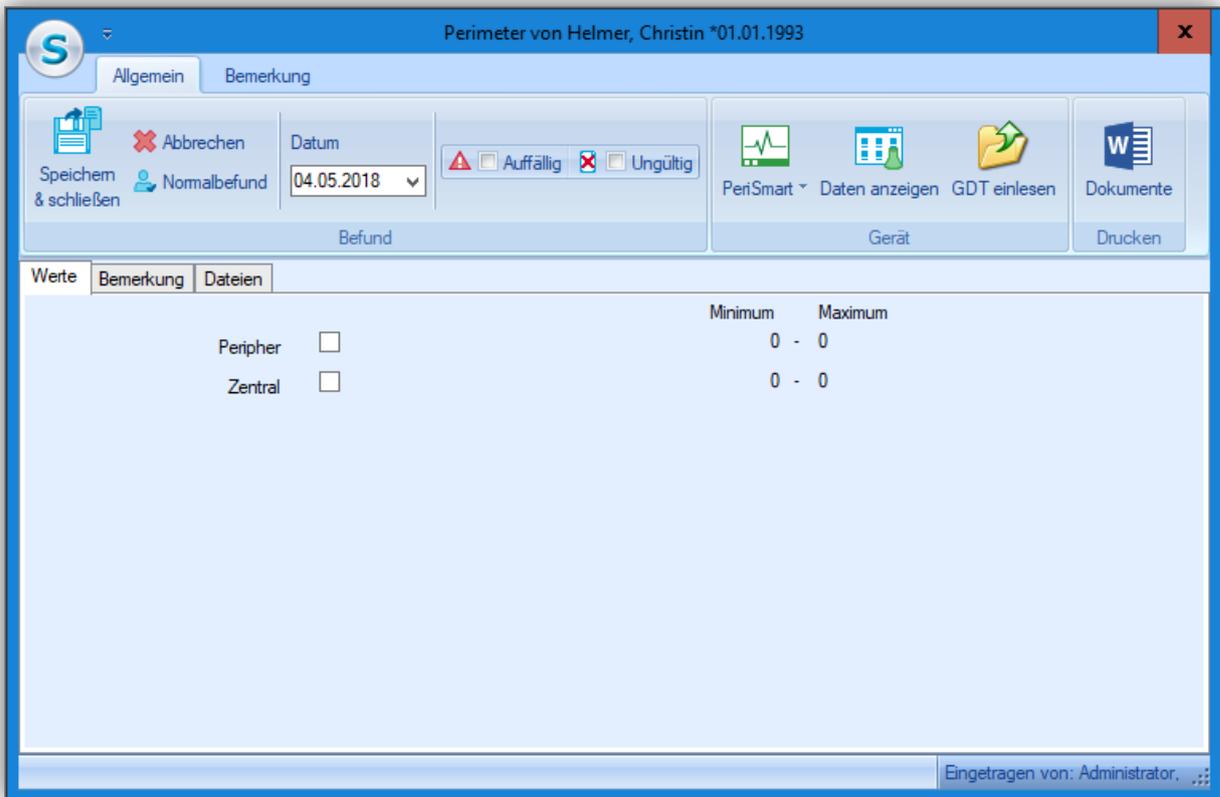


Abbildung 3: SAMAs Perimeter

- Starten Sie die Rodenstock Perismart/Peristat Software durch betätigen der Schaltfläche **PeriSmart**.
- Führen Sie die Untersuchung mit der Rodenstock Perismart/Peristat -Software durch.
- Nach dem Speichern der Daten in der Rodenstock Perismart/Peristat -Software wird nur das PDF-Dokument automatisch nach SAMAs übertragen.
- Schließen Sie die Perimeter Befundmaske über die Schaltfläche **Speichern & Schließen**.

## Abbildungsverzeichnis

|   |   |
|---|---|
| Abbildung 1: Konfiguration Rodenstock Perismart/Peristat..... | 5 |
| Abbildung 2: SAmAs Geräteeinstellungen .....                  | 6 |
| Abbildung 3: SAmAs Perimeter .....                            | 7 |